

**Instrukcja
obsługi**
AP-001

Frellux



Inne języki





Instrukcja obsługi

Spis treści

1.	Opis i przeznaczenie urządzenia	4
2.	Instrukcje bezpieczeństwa	4
3.	Cechy produktu	7
4.	Zawartość opakowania	9
5.	Sposób użytkowania urządzenia	9
5.1	Włączenie urządzenia	9
5.2	Wybór programu	9
6.	Przerwa w pracy urządzenia - Pauza	11
7.	Wyłączenie pauzy	12
8.	Zakończenie cyklu pracy urządzenia	12
9.	Wyłączenie urządzenia	13
10.	Ładowanie akumulatora	13
10.1	Wskazanie niskiego poziomu naładowania	13
10.2	Ładowanie akumulatora	13
10.3	Ładowanie akumulatora podczas pracy	14
11.	Czyszczenie i konserwacja	14
12.	Dane techniczne	14
13.	Opis użytych symboli	16
14.	Rozwiązywanie problemów	17
15.	Gwarancja	17
16.	Utylizacja urządzenia	17
16.1	Utylizacja zużytych akumulatorów	18
16.2	Utylizacja urządzenia	18
16.3	Opakowanie	18
17.	Deklaracja zgodności	19

Witamy w rodzinie urządzeń Zepter stworzonych
w oparciu o naszą wieloletnią filozofię:
Żyj lepiej. Żyj dłużej.

Dziękujemy za wybranie Zepter Frellux™,
kompaktowego, przenośnego urządzenia, które
w wyjątkowy sposób łączy technologie Hyperlight
i mikroprądów w jednym, łatwym w obsłudze
urządzeniu. Frellux™ jest przeznaczony
do codziennego stosowania w przypadku
napięcia mięśni, bólu lub zmęczenia skóry,
zapewniając spersonalizowane doznania
w dowolnym miejscu i czasie.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje
na temat funkcji urządzenia, bezpiecznej obsługi
i codziennego użytkowania.

1. Opis i przeznaczenie urządzenia

Frellux™ to innowacyjne, unikalne urządzenie przenośne, które łączy w sobie technologie czerwonego światła hyperlight (620–640 nm) i elektrostymulacji, powszechnie stosowane w przypadku dolegliwości bólowych, napięcia mięśniowego i oznak starzenia się skóry. Urządzenie posiada pięć programów częstotliwości światła hyperlight, zaprojektowanych tak, aby dostarczać progresywne spektrum energii – od trybów „ciepłych” o niższej częstotliwości, zapewniających efekt uspokajający, po tryby „zimne” o wyższej częstotliwości, odpowiednie do łagodzenia bólu lub podrażnień. Dzięki temu użytkownicy mogą wybrać odpowiedni program, który zapewni najwyższy komfort i będzie skuteczny w przypadku konkretnej dolegliwości. Dzięki 19 regulowanym poziomom intensywności mikroprądów, Frellux oferuje szeroki zakres doznań, od uspokajającej stymulacji czerwonym światłem hyperlight, po silniejszą, głębszą aktywację.

Cechy

- Światło czerwone hyperlight o długości fali 620–640 nm filtrowane przez fułeren C₆₀
- 36 mikroigieł pokrytych złotem, zapewniających równomierną, delikatną stymulację
- Pięć programów częstotliwości światła hyperlight
- 1–19 poziomów energii impulsowej
- Tryby niezależnego lub łączonego użytkowania
- Kompaktowa konstrukcja, idealna w podróży

2. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące urządzenia

Przed użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i obrażenia ciała. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

⚠ OSTRZEŻENIE! NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU CO NAJMNIEJ 8 LAT I PRZEZ OSOBY O OBNIŻONYCH MOŻLIWOŚCIACH FIZYCZNYCH, UMYSŁOWYCH I OSOBY O BRAKU DOŚWIADCZENIA I ZNAJOMOŚCI URZĄDZENIA, JEŻELI ZAPEWNIONY ZOSTANIE NADZÓR LUB INSTRUKTAŻ ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA W BEZPIECZNY SPOSÓB, TAK ABY ZWIĄZANE Z TYM ZAGROŻENIA BYŁY ZROZUMIAŁE. DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM. DZIECI BEZ NADZORU NIE POWINNY WYKONYWAĆ CZYSZCZENIA I KONSERWACJI URZĄDZENIA.

⚠ OSTRZEŻENIE! NINIEJSZE URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY (W TYM DZIECI) O OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, ZMYSŁOWYCH LUB UMYSŁOWYCH LUB OSOBY O BRAKU DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, CHYBA ŻE SĄ ONE NADZOROWANE LUB OTRZYMAŁY INSTRUKCJE DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA OD OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO.

⚠ OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie podłączaj urządzenia do źródła zasilania, które nie spełnia parametrów określonych w niniejszej instrukcji – parametry podano w sekcji 12. **Nie używaj zasilacza z uszkodzoną obudową lub bez znaku CE.**

⚠ OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieciowym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej zasilacza. **Po upewnieniu się, że obudowa nie jest uszkodzona, podłącz zasilacz do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego.**

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie używaj urządzenia mokrymi rękoma ani w wilgotnym otoczeniu (np. podczas kąpieli).

⚠ OSTRZEŻENIE! Urządzenia ani zasilacza nie wolno zanurzać w wodzie, spryskiwać wodą ani myć w zmywarce.

⚠ OSTRZEŻENIE! Funkcja elektrostymulacji głowy, szyi lub okolicy serca powinna być stosowana ostrożnie i tylko wtedy, gdy znasz zasady prawidłowego stosowania. Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie funkcji elektrostymulacji urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE! Urządzenie emituje czerwone światło hyperlight. Podczas korzystania z urządzenia należy unikać bezpośredniego kontaktu z oczami. Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło czerwonego światła hyperlight, gdy jest ono włączone.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przedostanie się płynów lub ciał obcych do obudowy urządzenia może wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo. W przypadku zanieczyszczenia urządzenia należy je natychmiast wyłączyć i zlecić kontrolę oraz serwis wyłącznie autoryzowanemu centrum serwisowemu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania. Do wycierania powierzchni zewnętrznych należy używać miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie wolno dopuścić do przedostania się płynów do otworów lub portów USB/zasilania. Nie należy używać alkoholu, rozpuszczalników, środków czyszczących o właściwościach ściernych ani detergentów w sprayu bezpośrednio na urządzeniu.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie należy używać urządzenia, jeśli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia: kabla połączeniowego, obudowy, igieł, diod LED lub innych części.

⚠ OSTRZEŻENIE! Nie należy samodzielnie wykonywać żadnych napraw ani modyfikacji.

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby naładować akumulator, podłącz urządzenie do zasilacza za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB.

⚠ OSTRZEŻENIE! Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis ZEPTER. W przypadku nieautoryzowanych napraw odpowiedzialność producenta jest wyłączona.

⚠ OSTRZEŻENIE! Przed użyciem tego urządzenia osoby cierpiące na ostre lub przewlekłe schorzenia powinny zasięgnąć profesjonalnej porady lekarza specjalisty, aby ustalić, czy ten rodzaj stymulacji ciała jest dla nich odpowiedni!

⚠ OSTRZEŻENIE! Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie urządzenia, nie mogą go używać osoby z następującymi schorzeniami lub w sytuacjach, w których użycie urządzenia może stanowić zagrożenie:

- z chorobami onkologicznymi, fotoalergią lub padaczką,
- z zaburzeniami układu krążenia, w tym chorobą wieńcową serca lub zakrzepicą,
- z implantami elektronicznymi, takimi jak rozruszniki serca lub sztuczne zastawki serca,
- z otwartymi ranami, patologicznymi zmianami skórnymi lub aktywnymi schorzeniami skóry,
- kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

Przed użyciem funkcji elektrostymulacji tego urządzenia należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje którekolwiek z powyższych schorzeń.

⚠ OSTRZEŻENIE! Bezpieczeństwo akumulatora: To urządzenie zawiera akumulator wielokrotnego ładowania. Nigdy nie wyrzucaj urządzenia ani akumulatora do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur. Jest to niebezpieczne i może spowodować wybuch akumulatora lub uwolnienie niebezpiecznych materiałów.

⚠ OSTRZEŻENIE! Urządzenie generuje ciepło podczas pracy. Należy unikać umieszczania go na powierzchniach wrażliwych na ciepło i obchodzić się z nim ostrożnie po dłuższym użytkowaniu, ponieważ niektóre części mogą się nagrzewać.

3. Cechy produktu

Widok urządzenia z góry:

- (1) - Zdejmowana soczewka pokryta fullerem
- (1a) - Zdejmowana osłona głowicy z igłami i źródłem czerwonego światła hyperlight

Przyciski sterujące elektrostymulacją

- (2) - Przycisk „0” włączający/wyłączający urządzenie
- (3) - Przycisk „+” zwiększający poziom energii impulsu
- (4) - Przycisk „-” zmniejszający energię impulsu na igłach

Przyciski sterujące światłem czerwonym hyperlight

- (5) - Przycisk „⏻” włączający/wyłączający czerwone światło hyperlight
- (6) - Przycisk „+” do zmiany programu światła czerwonego hyperlight
- (7) - Przycisk „-” do zmiany programu światła czerwonego hyperlight

Wyświetlacz

- (8) - ⚡ Wyświetlanie poziomu intensywności częstotliwości 1-19
- (9) - ✱ Wyświetlanie programu światła czerwonego hyperlight 1-5
- (10) - 🔋 Pasek poziomu naładowania akumulatora

Złącze zasilania

- (11) - Gniazdo USB typu C do podłączenia zasilacza



4. Zawartość opakowania

- Frellux
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Etui

5. Jak korzystać z urządzenia

UWAGA: Przed rozpoczęciem użytkowania użytkownik musi dokładnie zapoznać się z sekcją 2 niniejszej instrukcji i przestrzegać wskazanych środków bezpieczeństwa.

UWAGA: Po rozpakowaniu urządzenia oraz po każdym dłuższym okresie nieużywania należy podłączyć zasilacz na 5 godzin w celu pełnego naładowania akumulatora.

5.1 Włączenie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (2) przez co najmniej 3 sekundy, aż usłyszysz jeden krótki sygnał dźwiękowy. Pasek poziomu naładowania akumulatora (10) wyświetli aktualny poziom naładowania akumulatora przez 2 sekundy – liczba podświetlonych segmentów odpowiada pozostałemu poziomowi naładowania. Następnie wskaźnik poziomu energii impulsowej na igłach (8) wyświetli „0”, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do użycia. Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie się wyłączy, co zostanie zasygnalizowane dwoma długimi sygnałami dźwiękowymi.

5.2 Wybór programu

Można wybrać jedną z trzech metod działania urządzenia:

- I. Tylko elektrostymulacja
- II. Tylko czerwone światło hyperlight
- III. Elektrostymulacja i czerwone światło hyperlight

Zastosowanie czerwonego światła hyperlight:

programy 1-5 służą do relaksacji. Użytkownik powinien indywidualnie wybrać odpowiedni program zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.

I. Tylko elektrostymulacja:

- Zdejmij osłonę igieł **(1a)** i głowicy **(1)**, włącz urządzenie i rozpocznij elektrostymulację, ustawiając poziom intensywności na „1”.
- Poziom stymulacji można dowolnie zmieniać podczas pracy urządzenia za pomocą przycisków „+” **(3)** i „-” **(4)**. Po każdej zmianie poziomu stymulacji na górnym wyświetlaczu **(8)** pojawia się cyfra odpowiadająca ustawionemu poziomowi (od 1 do 19). Urządzenie oferuje 19 poziomów energii impulsu.
- Przyłóż urządzenie do obszaru ciała, który chcesz rozluźnić, i delikatnie przesuwaj je po skórze przez 10 minut. Zabieg można przedłużyć do dwóch sesji (łącznie 20 minut), aby uniknąć przegrzania obszaru.

II. Tylko czerwone światło hyperlight:

- Aby uzyskać bardziej relaksujący efekt, pozostaw osłonę na urządzeniu.
- Włącz urządzenie. Pozostaw elektrostymulację na poziomie intensywności „0”.
- Aby uruchomić program czerwonego światła hyperlight, należy przytrzymać przycisk **(5)** przez co najmniej 3 sekundy, aż usłyszysz jeden krótki sygnał dźwiękowy. Wyświetlacz programu czerwonego światła hyperlight **(9)** pokazuje 0, co oznacza, że funkcja ta jest gotowa do działania.
- Program czerwonego światła hyperlight można dowolnie zmieniać, naciskając krótko przyciski „+” **(6)** i „-” **(7)**; na dolnym wyświetlaczu **(9)** pojawiają się kolejne cyfry od 1 do 5, wskazując programy relaksacyjne czerwonego światła hyperlight.
- Programy czerwonego światła hyperlight:
 - Ciągłe czerwone światło hyperlight - wyświetlana jest „cyfra 1”.
 - Pulsacja przy 10 Hz - wyświetlana jest „cyfra 2”.
 - Pulsacja przy 600 Hz - wyświetlana jest „cyfra 3” (neutralna)
 - Pulsacja przy 3 kHz - wyświetlana jest „cyfra 4”.
 - Pulsacja przy 8 kHz - wyświetlana jest „cyfra 5”.

- Programy 1–2 wykorzystują cieplejsze czerwone światło hyperlight, wytwarzane poprzez emisję ciągłą lub o niskiej częstotliwości. Programy 4–5 wykorzystują chłodniejsze czerwone światło hyperlight, wytwarzane poprzez pulsację o wyższej częstotliwości. Program 3 plasuje się pomiędzy ciepłym a chłodnym czerwonym światłem hyperlight.
- Przyłóż urządzenie do obszaru ciała, który chcesz rozluźnić, i delikatnie przesuwaj je po skórze przez 10 minut. Zabieg można przedłużyć do dwóch sesji (łącznie 20 minut), aby uniknąć przegrzania obszaru.

III. Elektrostymulacja i czerwone światło hyperlight:

Zastosowanie czerwonego światła hyperlight w połączeniu z elektrostymulacją tworzy efekt synergii.

- Rozpocznij elektrostymulację, ustawiając poziom intensywności na „1”. Wybierz intensywność elektrostymulacji, która jest dla Ciebie komfortowa. Elektrostymulację można regulować w dowolnym momencie podczas aplikacji, naciskając przycisk „+” **(3)** lub zmniejszać, naciskając przycisk „-” **(4)**.
- Wybierz program czerwonego światła hyperlight zgodnie z własnymi preferencjami.
- Przyłóż urządzenie do obszaru ciała, który chcesz rozluźnić, i delikatnie przesuwaj je po skórze przez 10 minut. Zabieg można przedłużyć do dwóch sesji (łącznie 20 minut), aby uniknąć przegrzania obszaru.

UWAGA: Podczas lub po użyciu na skórze może pojawić się lekkie zaczerwienienie, które jednak powinno zniknąć po krótkim czasie.

6. Przerwa w pracy urządzenia - Pauza

W dowolnym momencie podczas pracy urządzenia można aktywować funkcję pauzy, naciskając krótko przycisk **(2)**. Po aktywacji na górnym wyświetlaczu **(8)**, pojawi się litera „P”, a funkcje elektrostymulacji i czerwonego światła hyperlight zostaną tymczasowo wyłączone. Aby wznowić działanie, należy ponownie nacisnąć przycisk **(2)**. Jeśli nie zostaną podjęte żadne działania, urządzenie może automatycznie wyłączyć się po określonym czasie, aby oszczędzać akumulator.

Gdy poziom elektrostymulacji jest ustawiony na 1, naciśnięcie przycisku „-” (4), który reguluje poziom elektrostymulacji, również spowoduje wstrzymanie działania urządzenia.

7. Wyłączenie funkcji pauzy

Stan pauzy można wyłączyć, naciskając krótko:

- a) Φ (2). Urządzenie wznowi działanie. Litera „P” zniknie z górnego wyświetlacza (8), a w jej miejsce pojawi się cyfra wskazująca ostatni poziom energii impulsu zastosowany na igłach. Jeśli wybrano program relaksacyjny czerwonym światłem hyperlight, również zostanie on wznowiony.
- b) „+” na poziomie energii impulsów na igłach (3), jeśli pauza została aktywowana poprzez przejście z programu 1 do programu 0 energii impulsów na igłach. Urządzenie wznowi działanie. Litera „P” zniknie z górnego wyświetlacza (8), a w jej miejsce pojawi się cyfra 1 wskazująca poziom energii impulsów na igłach. Jeśli wybrano program relaksacji z czerwonym światłem hyperlight, również zostanie on wznowiony.

W trybie pauzy urządzenie można wyłączyć, naciskając przycisk Φ (2) przez 3 sekundy lub nie naciskając żadnego przycisku przez 1 minutę.

8. Zakończenie cyklu pracy urządzenia

Pojedyncza sesja urządzenia trwa 10 minut i kończy się jednym długim sygnałem dźwiękowym. Po zakończeniu sesji na wyświetlaczach pojawi się informacja o wcześniej ustawionym poziomie energii impulsu i programie czerwonego światła hyperlight (jeśli został aktywowany).

Po pierwszej sesji można rozpocząć drugą sesję stymulacji w ciągu jednej minuty.

W celu rozpoczęcia drugiej sesji, należy krótko nacisnąć przycisk „+” (3), aby ponownie aktywować poprzednio używany poziom energii impulsowej i program czerwonego światła hyperlight.

Po zakończeniu dwóch kolejnych 10-minutowych sesji (łącznie 20 minut) urządzenie przechodzi w tryb hibernacji trwający 3 minuty. Podczas hibernacji na górnym wyświetlaczu (8) pojawia się litera „H”. Po zakończeniu hibernacji na wyświetlaczu pojawi się „0”, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do dalszego użytkowania.

Jeśli urządzenie pozostanie nieaktywne po hibernacji, po upływie jednej minuty wyłączy się automatycznie, aby oszczędzać energię akumulatora.

9. Wyłączanie urządzenia

Urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając i przytrzymując przycisk Φ (2) przez co najmniej 3 sekundy, aż usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe. Spowoduje to wyłączenie zarówno funkcji elektrostymulacji, jak i światła czerwonego hyperlight. Po wyłączeniu wszystkie cyfry na wyświetlaczu zgasną, wskazując, że urządzenie nie działa.

10. Ładowanie akumulatora urządzenia

10.1 Wskazanie niskiego poziomu naładowania

Niski poziom naładowania akumulatora sygnalizowany jest powolnym miganiem pierwszego segmentu na pasku poziomu naładowania akumulatora (10). W takim przypadku urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania w celu naładowania. Jeśli pierwszy segment na pasku poziomu naładowania akumulatora pozostaje stale zapalony, oznacza to, że akumulator jest całkowicie rozładowany. W takim przypadku urządzenie należy natychmiast podłączyć do źródła zasilania, aby uniknąć automatycznego wyłączenia.

10.2 Ładowanie akumulatora

Ładowanie akumulatora rozpoczyna się po podłączeniu kabla USB zasilacza do gniazda urządzenia (11), a następnie podłączeniu zasilacza do gniazda sieciowego. Punkty na pasku poziomu naładowania akumulatora (10) zapalają się

odpowiednio do poziomu naładowania akumulatora.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, ostatni punkt na pasku poziomu naładowania akumulatora **(10)** zapala się i pozostaje zapalony do momentu odłączenia zasilacza od urządzenia.

Urządzenie można używać podczas ładowania. Urządzenie można uruchomić, naciskając i przytrzymując przycisk **(2)** przez 3 sekundy.

- Czas ładowania
~ 3 godziny
- Całkowity czas pracy po naładowaniu akumulatora
8 cykli 2 x 10 min. z 3-minutową przerwą

10.3 Ładowanie akumulatora podczas pracy

Ładowanie akumulatora można rozpocząć w dowolnym momencie. Proces ten nie przerywa wybranego programu stymulacji. Wskazanie na pasku poziomu naładowania akumulatora **(10)** jest identyczne jak w sekcji 10.2.

11. Czyszczenie i konserwacja

Urządzenie należy wyczyścić miękką, czystą i wilgotną ściereczką po wyłączeniu i odłączeniu od zasilania.

Po każdym użyciu urządzenia zaleca się dezynfekcję igieł za pomocą ogólnodostępnego środka dezynfekującego.

⚠ UWAGA! Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie czyść go pod bieżącą wodą. Nie używaj ściernych środków czyszczących ani ściereczek, ani środków zawierających chlor.

12. Dane techniczne urządzenia

1. Producent i centrum serwisowe

ZEPTER INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 37,
02-672 Warszawa, Polska

2. Wymagane parametry zasilacza (zasilacz nie wchodzi w skład zestawu)

- Gniazdo USB-A
- Napięcie wyjściowe 5,0 V DC

- Prąd wyjściowy minimalny 1,1 A
- Zasilacz z oznaczeniem CE zgodny z przepisami UE

3. Frellux

- Temperatura pracy urządzenia i ładowania akumulatora
+10°C - +30°C
- Temperatura transportu i przechowywania do 3 miesięcy
-10°C - +40°C
- Wilgotność podczas przechowywania i użytkowania
< 75%
- Typ akumulatora
Li-Ion polimerowy NCM 102540 3,7 V 1100 mAh
- Energia impulsu przy obciążeniu 500 Ohm
< 300 mJ
- Długość fali źródła czerwonego światła hyperlight
640±30 nm
- Parametry impulsu czerwonego światła hyperlight:
czas impulsu / interwał / powtarzalność

- Program 1	ciągłe czerwone światło hyperlight
- Program 2	0,05 s / 0,05 s / 100%
- Program 3	0,833 · 10 ⁻³ s / 0,833 · 10 ⁻³ s / 100%
- Program 4	0,166 · 10 ⁻³ s / 0,166 · 10 ⁻³ s / 100%
- Program 5	0,0625 · 10 ⁻³ s / 0,0625 · 10 ⁻³ s / 100%
- Waga bez opakowania:
Frellux 170 g +/- 10 g
- Kraj pochodzenia:
Polska
- Produkt spełnia następujące normy:
EN 60335-1
EN 62233
EN 62471
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

13. Opis użytych symboli



Instrukcja obsługi



Przeczytaj instrukcję obsługi



Do użytku w pomieszczeniach



Zabrania się wyrzucania zużytego urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) nie może być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi.



Urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy i nie można go wyrzucać wraz z normalnymi odpadami domowymi.



Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE.



Znak EAC oznacza, że produkt jest zgodny z obowiązującymi normami, przeszedł wszystkie procedury oceny zgodności Unii Celnej Euroazjatyckiej i jest dopuszczony do obrotu w krajach Unii Celnej.



Ostrzeżenie

14. Rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązania
Brak reakcji po naciśnięciu przycisku  – nie można aktywować urządzenia	Rozładowany akumulator	Podłącz zasilacz o parametrach podanych w niniejszej instrukcji i naładuj akumulator
Urządzenie nie działa, nie reaguje, gdy podłączony jest zasilacz	- Brak napięcia na gniazdku sieciowym - nieprawidłowo podłączony kabel zasilający USB - niewłaściwy zasilacz sieciowy	- Podłącz zasilacz o parametrach podanych w tej instrukcji do sprawnego gniazodka sieciowego - Odłącz kabel USB od urządzenia i zasilacza, podłącz go dokładnie ponownie

Jeśli te rozwiązania nie pomogą, odłącz zasilacz od sieci zasilającej i oddaj cały zestaw do serwisu.

15. Gwarancja

Gwarancja obowiązuje przez **2 lata** od daty zakupu wskazanej na fakturze wystawionej przez sprzedawcę w momencie dostawy.

Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej przekazanej klientowi wraz z produktem i fakturą zakupu.

Gwarancja nie ma wpływu na prawa klienta wynikające z przepisów prawa krajowego ani na prawa klienta wynikające z umowy sprzedaży.

16. Utylizacja urządzenia

Poniższe informacje dotyczące ochrony środowiska mają zastosowanie w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie i obudowa urządzenia, a także instrukcja obsługi i karta gwarancyjna nadają się do recyklingu.

16.1 Utylizacja zużytych akumulatorów



Ten produkt zawiera akumulator. Ten symbol oznacza, że akumulator nie powinien być wyrzucany wraz z normalnymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Akumulator nie zawiera nadmiernych ilości rtęci ani kadmu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542.

Dla własnego bezpieczeństwa nie należy wyjmować akumulatora z urządzenia. Należy zawsze skontaktować się z autoryzowanym serwisem Zepter.

Wymiana akumulatora musi być przeprowadzona przez autoryzowany serwis Zepter; wymiana przez użytkownika jest zabroniona.



OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wrzucaj akumulatora do ognia. Jest to bardzo niebezpieczne i zabronione. Może to spowodować wybuch.

16.2 Utylizacja urządzenia



Ten symbol oznacza, że w Unii Europejskiej produkt należy utylizować w oddzielnym punkcie zbiórki odpadów. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone w ten sposób nie mogą być utylizowane wraz z normalnymi odpadami domowymi; należy je zamiast tego dostarczyć do punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

16.3 Opakowanie



Jeśli chcesz zutylizować opakowanie, postępuj zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska obowiązującymi w Twoim kraju.

17. Deklaracja zgodności



Frellux jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi: EMC (dyrektywa 2014/30/UE), ROHS (dyrektywa 2011/65/UE wraz z dyrektywą 2015/863/UE zmieniającą załącznik II), WEEE (dyrektywa 2012/19/UE). Deklaracja zgodności CE gwarantuje, że urządzenie jest bezpieczne, zostało sprawdzone i przetestowane oraz spełnia wszystkie wymagania określone w obowiązujących normach, dyrektywach i przepisach.

Frellux

Instrukcja obsługi

AP-001



www.zepter.pl

Zepter International Poland Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 37

02-672 Warszawa

Polska

Home Art & Sales Services AG

Sihleggstrasse 23

8832 Wollerau

Szwajcaria